

# Ophalen API koppeling gegevens

Theramon Cloud

**ORTHOSMART B.V.**  
**6 FEBRUARI 2025**

# Ophalen API koppeling gegevens

Theramon Cloud

## Inhoudsopgave

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 2. REGISTREREN SOFTWARE VOOR API KOPPELING ..... | 2 |
| 2.1 REGISTREREN SOFTWARE .....                   | 2 |

# Ophalen API koppeling gegevens

Theramon Cloud


## 2. Registreren Software voor API koppeling

### 2.1 Registreren software


Als gebruik gemaakt wordt van externe software voor het beheren van in Theramon Cloud opgeslagen gegevens ipv gebruik te maken van de Theramon Cloud software dan dient voor deze externe software een API koppeling geregistreerd te worden in de Theramon Cloud omgeving.

De volgende stappen leiden u door het registratie proces van externe software met als doel een API URL, API key en API secret aan te maken die de externe software nodig heeft voor het verbinden met de Theramon Cloud:

1. Ga naar <https://cloud.thera-mon.com>
2. Log hier in

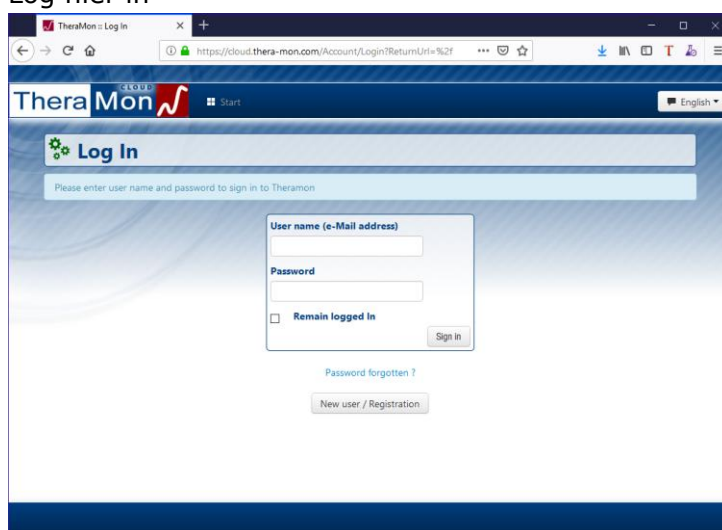


3. Klik op het hoofdscherm op settings

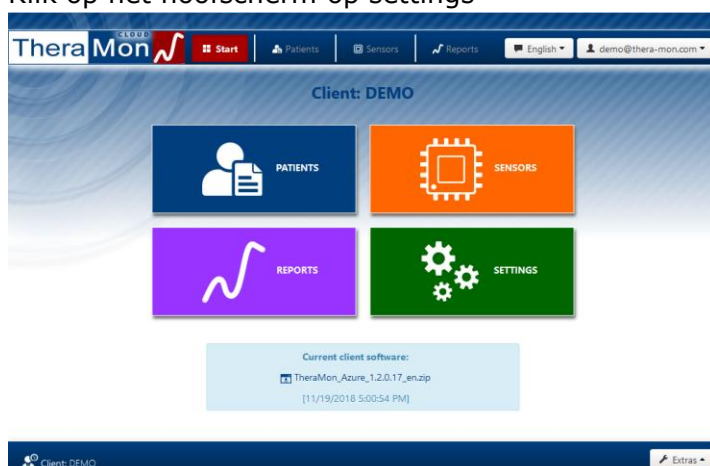


# Ophalen API koppeling gegevens

## Theramon Cloud

4. Klik op Interfaces

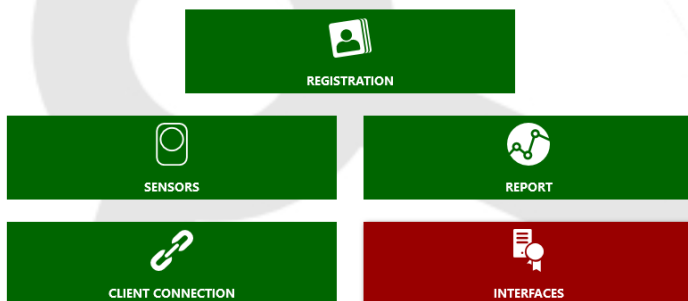

5. Klik nu op New om een registratie te doen van externe software

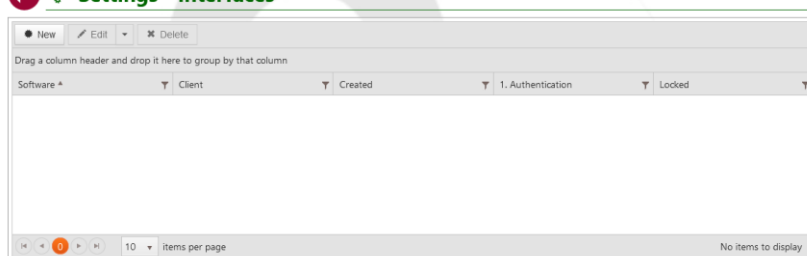


6. Geef de naam van de software op en vink aan welke rechten deze software krijgt om data te benaderen

7. Klik op save om de externe software registratie op te slaan


# Ophalen API koppeling gegevens

## Theramon Cloud

8. Selecteer de aangemaakte externe software en klik op het pijltje naast Edit om te kiezen voor details

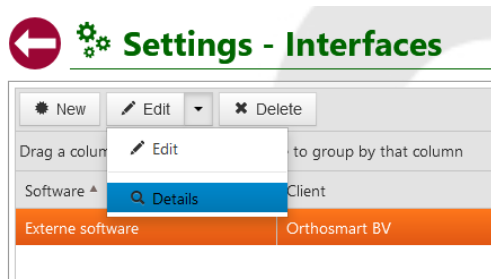

9. U krijgt nu de voor de externe software noodzakelijke API koppelingsinformatie te zien.

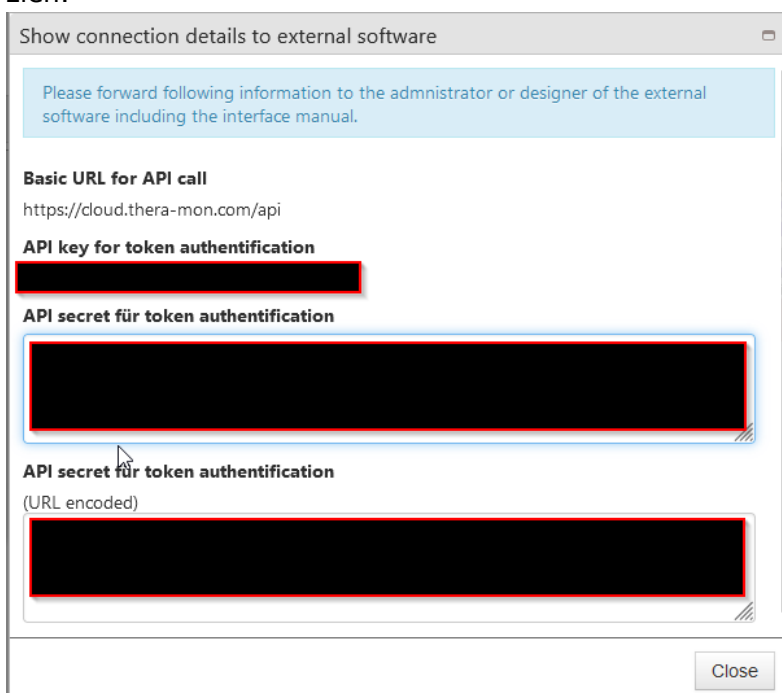

10. Gebruik de gegevens in het externe software pakket om de koppeling tot stand te brengen. Hiervoor dient u gebruik te maken van de informatie die u van de software leverancier van het externe software pakket heeft ontvangen of die u aan deze leverancier door dient te geven.

**Let op: het delen van deze API gegevens geeft de ontvanger toegang tot alle informatie die in uw Theramon Cloud beschikbaar is. Deel deze informatie dus alleen met vertrouwde partijen en bewaar deze op een veilige plaats. Wij adviseren u om deze gegevens alleen zelf in te stellen in de externe software die u gebruikt.**