

Draagtijd instellen

Theramon Cloud

ORTHOSMART B.V.
30 OKTOBER 2025

Draagtijd instellen

Theramon Cloud

Inhoudsopgave

2. INSTELLEN DRAAGTIJD REGELS	2
2.1 INSTELLEN STANDAARD DRAAGTIJD REGELS	2
2.2 TIJDELIJK AFWIJKENDE DRAAGTIJD REGELS INSTELLEN PER PATIËNT	3
2.2 DRAAGTIJD REGELS AANPASSEN PER PATIËNT	5

Draagtijd instellen

Theramon Cloud


2. Instellen draagtijd regels

2.1 Instellen standaard draagtijd regels

Op basis van de standaard draagtijd regels wordt door het Theramon systeem bepaald of een patiënt voldaan heeft aan deze draagtijd regels op basis van de data die door de chips is vastgelegd.

De standaard draagtijd regels kunnen in de Theramon Cloud omgeving ingesteld worden via de volgende stappen:

1. Ga naar: <https://cloud.thera-mon.com/> en login met het Cloud account
2. Ga naar Settings en klik op Sensors

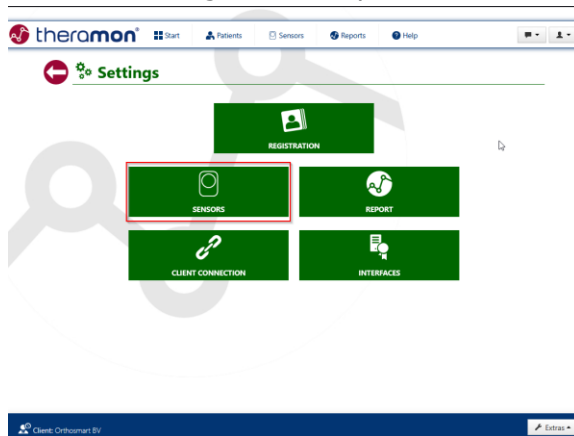

3. Wijzig de standaard waarden voor gewenste draagtijden onder het kopje Standard wearing criteria

Standard wearing criteria

Please enter the default settings for the wearing criteria here. These are entered as standard for each new sensor, but can be changed at any time. "Hours/day" means how many hours per day the makeshift has to be worn to be considered successful. "Min. hours at a time" means how many hours the makeshift must be worn continuously for this period to be considered valid. The compliance percentage is used for the compliance report. It defines how many days in a selected period the wearing criteria must be met for the treatment to be considered successful.

Hours/day: Minimum continuous hours: Compliance percentage:

- a. Hours/day:

Hier stel je in wat de draagtijd (aantal uren per dag) moet zijn voor alle patiënten.

Aan te bevelen is het aantal uren per dag op 16 uur te zetten als iemand hem dag en nacht moet dragen.

- b. Min. Hours in a stretch:

Dit is het aantal uren dat een patiënt de uitneembare apparatuur aaneengesloten moet dragen. Standaard staat dit op 2 uur, **maar het advies is om deze op 0 te zetten**. De standaard van 2 betekent dat de patiënt de beugel 2 uur aaneengesloten moet dragen. Dit kan een vertekend beeld geven als bijvoorbeeld een patiënt de beugel heel even uit heeft op het moment dat een meting plaats vindt. Dan wordt niet meer voldaan aan het minimaal 2 uur aaneengesloten dragen voldaan en zal deze 2 uur dus niet meetellen als gedragen.

Draagtijd instellen

Theramon Cloud


- c. Compliance percentage
Hier geeft je aan hoeveel procent van de dagen aan de draagtijd moet worden voldaan. Hiermee wordt bepaald of de draagtijd is nageleefd.

2.2 Tijdelijk afwijkende draagtijd regels instellen per patiënt


Gedurende de behandeling van de patiënt kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk af te wijken van de standaard draagtijd regels. Bijvoorbeeld als de patiënt tijdelijk de beugel langer per dag in moet hebben. De standaard regels kunnen dan tijdelijk worden aangepast voor de specifieke patiënt.

Dit kan per patiënt ingesteld worden via:

1. Ga naar: <https://cloud.thera-mon.com/> en login met het Cloud account
2. Ga naar Patients
3. Zoek de patient en selecteer deze en klik op het pijltje achter de edit optie

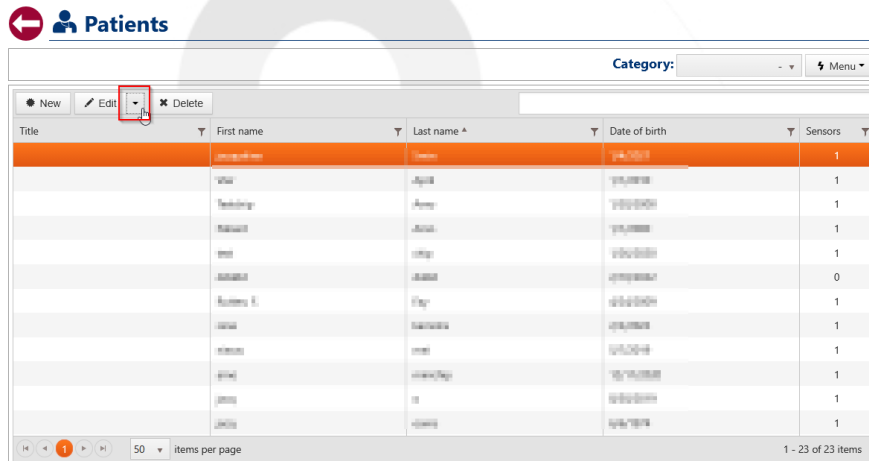


4. Klik op show assigned sensors

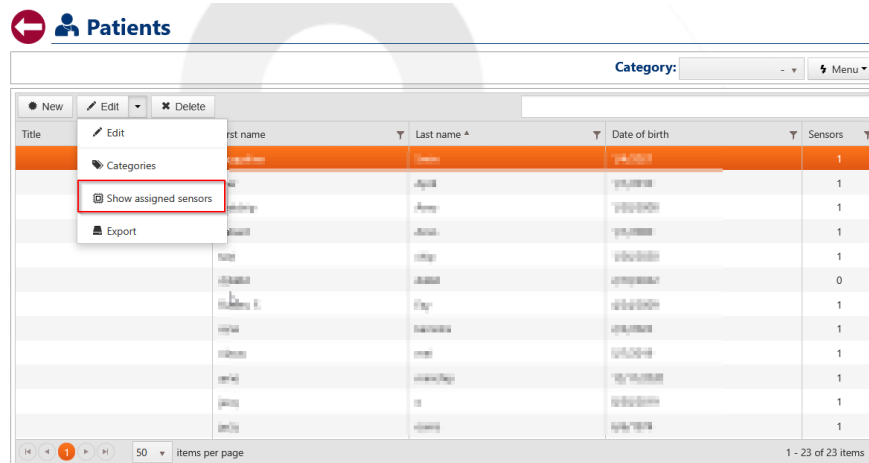


Draagtijd instellen

Theramon Cloud


5. Selecteer de sensor en klik op de details knop

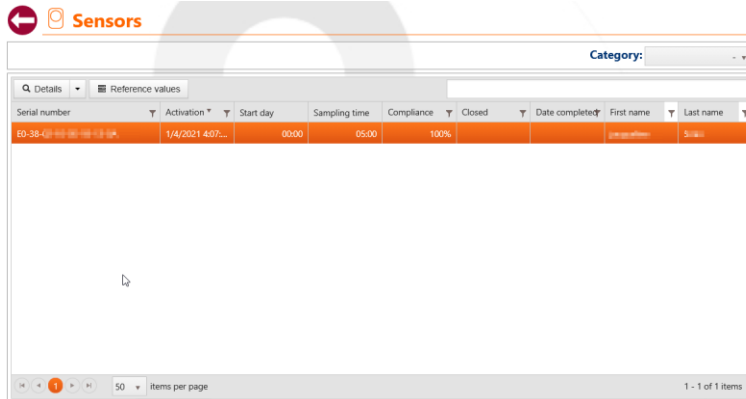

6. Bij details kan de Compliance (naleving van de draagtijd) worden aangepast

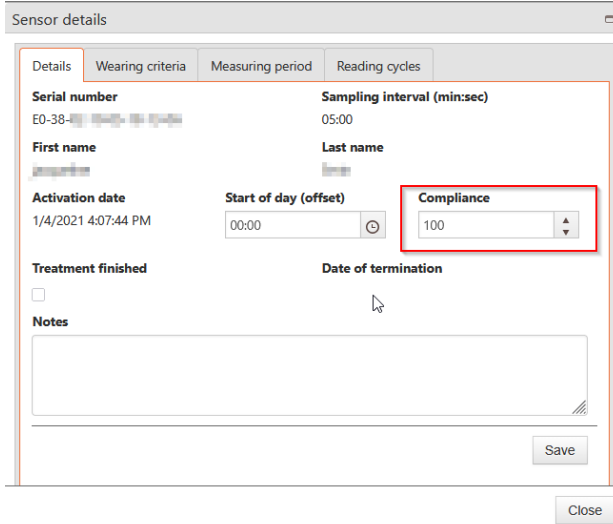


7. Via het tabje Wearing criteria is het mogelijk om tijdelijke draagtijd regels toe te voegen

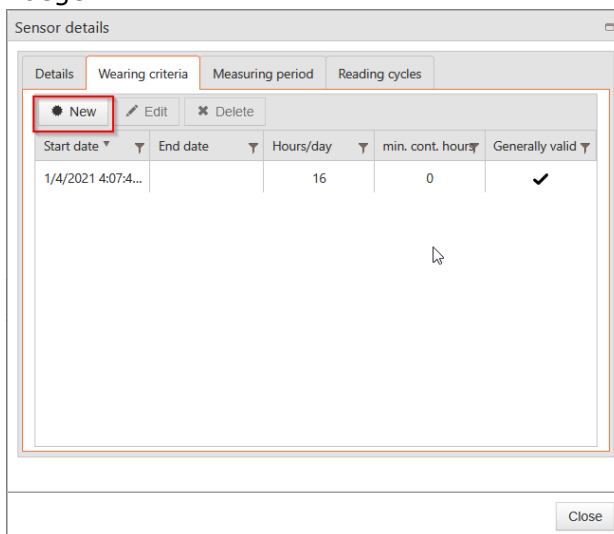

Draagtijd instellen

Theramon Cloud

- Vul nu de tijdelijke draagtijd regels in die voor deze patiënt/sensor gebruikt moet gaan worden voor de periode tot het volgende moment waarop de chip uitgelezen wordt

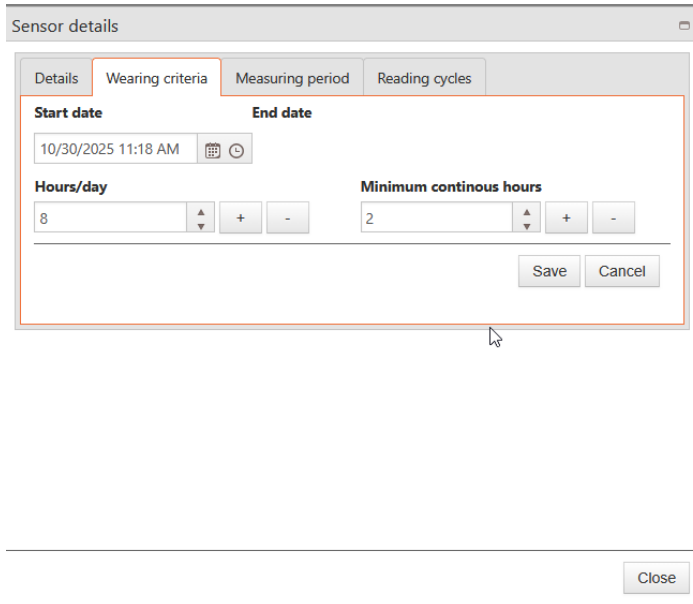


Let op: de tijdelijke draagtijd regels gelden alleen voor de periode die ingesteld is bij de start date t/m het volgende moment van uitlezen van chip. Daarna gelden de regels weer van de regel met het vinkje bij Generally valid.

2.2 Draagtijd regels aanpassen per patiënt

Gedurende de behandeling van de patiënt kan het noodzakelijk zijn om af te wijken van de standaard draagtijd regels. Bijvoorbeeld als de patiënt langer in behandeling is en het aantal uren per dag minder is dan de standaard draagtijd.

De draagtijd kan dan per patiënt aangepast worden via:

- Ga naar: <https://cloud.thera-mon.com/> en login met het Cloud account
- Ga naar Patients
- Zoek de patient en selecteer deze en klik op het pijltje achter de edit optie

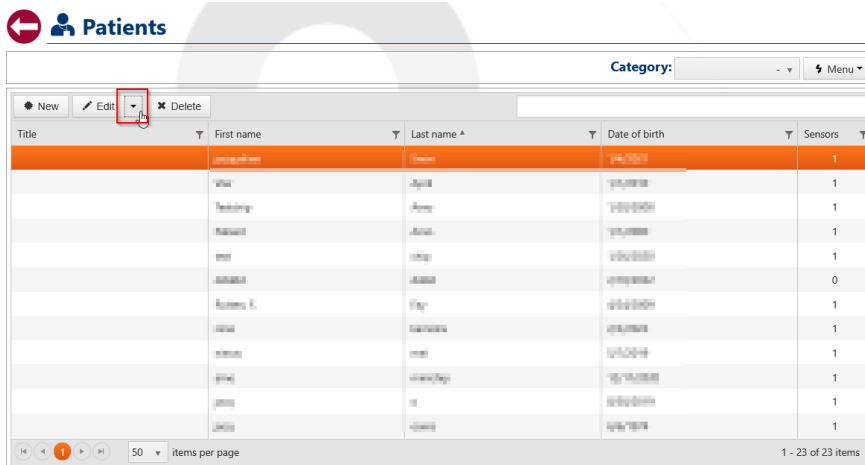

Category: - v Menu v


Title	First name	Last name ^	Date of birth	Sensors
				1
				1
				1
				1
				1
				0
				1
				1
				1
				1
				1
				1
				1
				1

1 - 23 of 23 items


Draagtijd instellen

Theramon Cloud


4. Klik op show assigned sensors

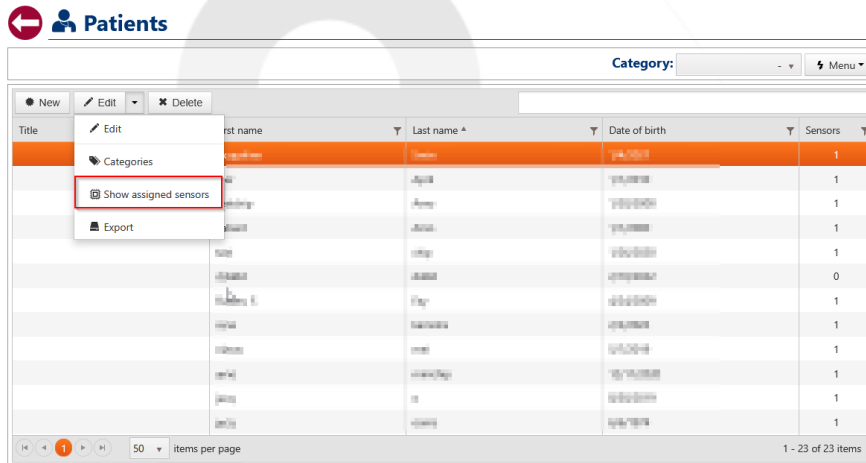

5. Selecteer de sensor en klik op de details knop

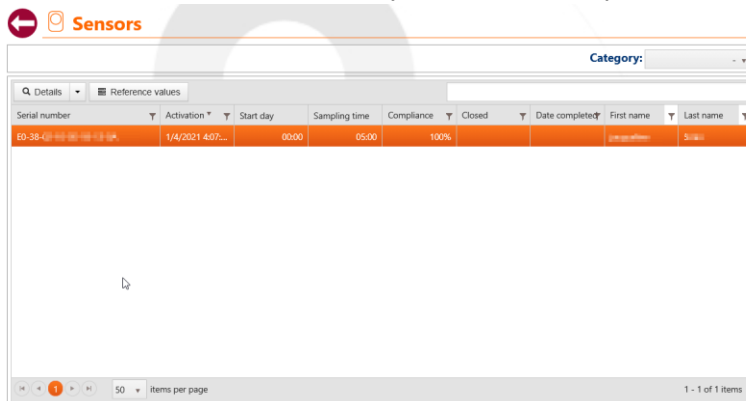


6. Bij details kan de Compliance (naleving van de draagtijd) worden aangepast

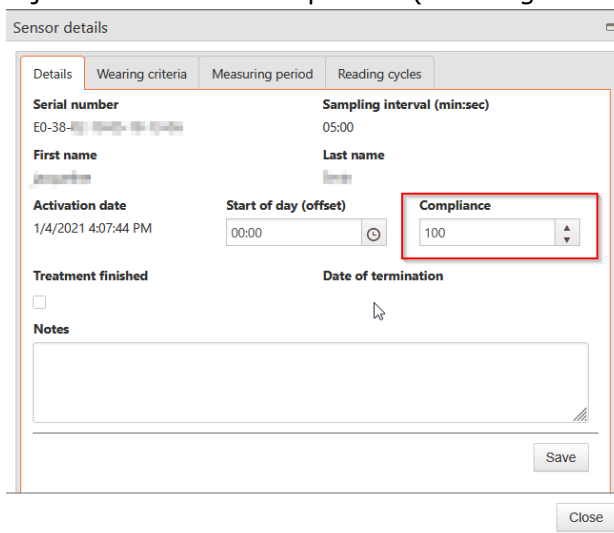


Draagtijd instellen

Theramon Cloud

7. Via het tabje Wearing criteria is het mogelijk om de draagtijd regels voor deze patiënt/chip te wijzigen

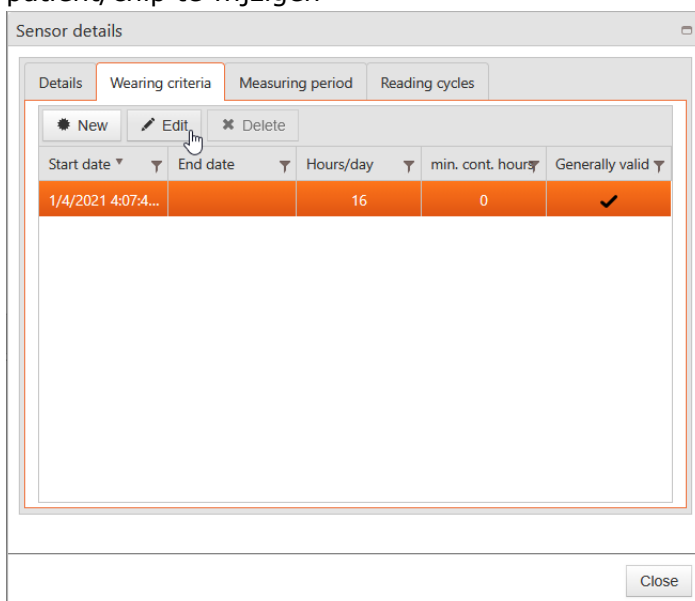

8. Wijzig nu de draagtijd regels en sla deze op

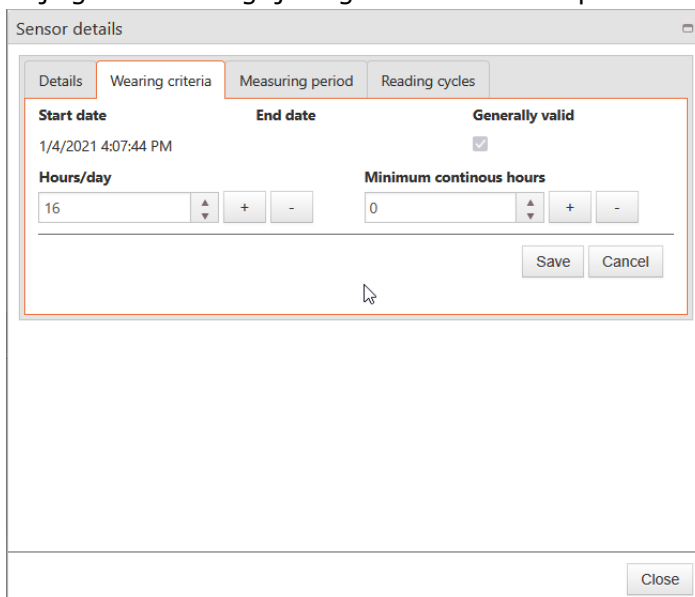

De nieuwe draagtijd regels zijn nu van toepassing